


Tools for SARS-CoV-2 Research

Support your COVID-19 virus (SARS-CoV-2) research

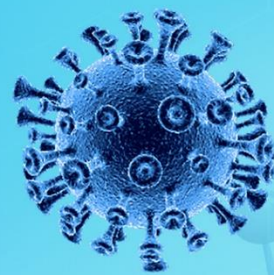

Elabscience®

新型コロナウイルス(2019-nCoV)抗体検査キット

COVID-19 IgG/IgM Rapid Test Kit



この製品はヒト血清、血漿または全血中のSARS-CoV-2(2019-nCoV)に対するIgG/IgM抗体を定性的に検出するためのキットです。イムノクロマトグラフィーにより短時間で結果を確認できます。

税別価格 **¥47,000** / 40テスト

1つのカセットでIgG/IgM両方の結果が確認できます

測定時間：10分

検体：血清、血漿または全血

測定原理：金コロイドイムノクロマトグラフ法(GICA)

構成品：テストカセット、バッファー、ドロPPER

※ランセットとアルコールパッド、その他上記以外のものは付属していません。


※弊社で販売するElabscience社製品は、すべて試験研究用試薬です。

体外診断薬としての利用はできませんのでご注意ください。

本製品の使用により発生した損害および損失について、弊社では責任を負いません。

※Elabscience社の子会社であるUNscience社のラベルで販売しております。

手順

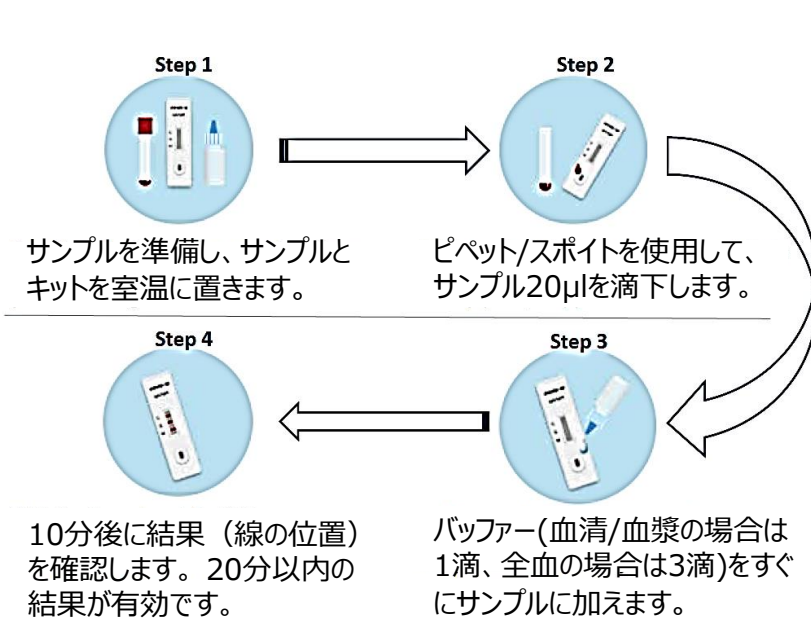


本製品を使用する前に、必ずメーカーの製品マニュアルをお読みいただき、使用上の注意を確認してください。
※製品マニュアルはフィルジェンHPでも公開中



Elabscience社キャラクター "Erie"

結果の判定

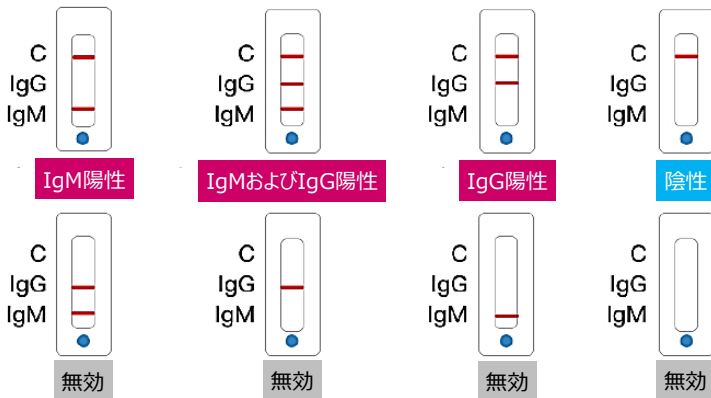

IgM陽性：コントロールライン(C)およびIgMにラインが出た場合、一次感染の可能性を示しています。

IgGおよびIgM陽性：コントロールライン(C)およびIgMとIgGにラインが出た場合、急性二次感染の可能性を示しています。

IgG陽性：コントロールライン(C)およびIgGにラインが出た場合、二次感染の可能性を示しています。

陰性：コントロールライン(C)しかラインが出なかった場合、陰性です。

無効：コントロールライン(C)が出なかった場合実験の失敗を示しています。新しいカセットで再度テストして下さい。

製品名	COVID-19 IgG/IgM Rapid Test Kit
品番	UNCOV-40
税別価格	47,000円
キット構成	テストカセット(各テスト分)、バッファー、ドロPPER ※サンプル採取のための消耗品や保存容器等、上記以外のものは付属しておりませんのでご注意ください。

フィルジェン 株式会社



代理店

【お問い合わせ】 試薬部

TEL : 052-624-4388 FAX : 052-624-4389

メール : biosupport@filgen.jp URL : https://filgen.jp/

(Jun.2020)